

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Комитета по новой
медицинской технике

Д. И. Пайзиев



«25» 09 2025г.

Н и ЭС № 23

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Раствор изотонический с морской водой ПШИК МИНИ

Назначение:

ПШИК МИНИ, раствор изотонический с морской водой, применяется:

- как средство для ежедневного увлажнения слизистой носа для сохранения ее защитных физиологических свойств в условиях повышенной сухости воздуха;
- для облегчения состояния пациента при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазухах носа и носовой полости различной этиологии (риниты, синуситы);
- при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осенне-зимний период;
- для уменьшения проявлений местного воспалительного процесса в носовой полости и при осложненном носовом дыхании;
- для очищения слизистой носа от пыли, аллергенов и других факторов загрязнения воздуха;
- по уходу за носовой полостью после хирургических вмешательств, для восстановления физиологического состояния слизистой оболочки;
- как вспомогательное средство при лечении гипертрофии аденоидов у детей;
- как вспомогательное средство при лечении аллергического (вазомоторного) сезонного или круглогодичного ринита.

Состав:

Вода морская очищенная, вода для инъекций.

Описание:

Прозрачная бесцветная жидкость.

Медицинское изделие ПШИК МИНИ создано на основе морской воды из заповедной зоны, расположенной в западной части побережья Франции (локализация Сен-Геноле, Бретань).



Морская вода у берегов Бретани считается чистой благодаря самоочищению и постоянному обновлению за счет сильных приливных и отливных морских течений.

Свойства:

- улучшает функцию мерцающего эпителия, что усиливает резистентность слизистой полости носа и придаточных пазух к проникновению болезнетворных бактерий и вирусов;
- способствует очищению слизистой носа от пыли, аллергенов и инфицированного назального секрета;
- способствует разжижению и выведению слизи и нормализации его образования бокаловидными клетками слизистой носа, способствует восстановлению свободного дыхания;
- помогает восстановить проходимость и нормальное функционирование дыхательных путей, ускоряет выздоровление при заболеваниях носоглотки и придаточных пазух носа;
- снимает заложенность носа и ощущение давления в носовых пазухах;
- помогает в нормализации pH назального секрета;
- не содержит в своем составе консервантов;
- представляет собой стерильный продукт.


Способ применения и дозировка:

ПШИК МИНИ, применяется в лечебных и профилактических целях, а также для ежедневной гигиены носовой полости:

- детям до 1 года — по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в сутки;
- детям в возрасте 1-6 лет — по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-3 раза в сутки;
- детям в возрасте 6-12 лет - по 2 капли в каждый носовой ход 2-4 раза в сутки;
- взрослым и детям от 12 лет - по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-6 раз в сутки.

Одноразовый флакон-капельница (небула) прост и безопасен в использовании. Флакон открывается поворотом колпачка, который полностью отделяется.

Младенцам рекомендуется выполнять промывание в положении лежа. Повернув голову ребенка в сторону, промыть верхний носовой ход, повторить процедуру с другим носовым ходом. Не вводите флакон глубоко в носовой ход.

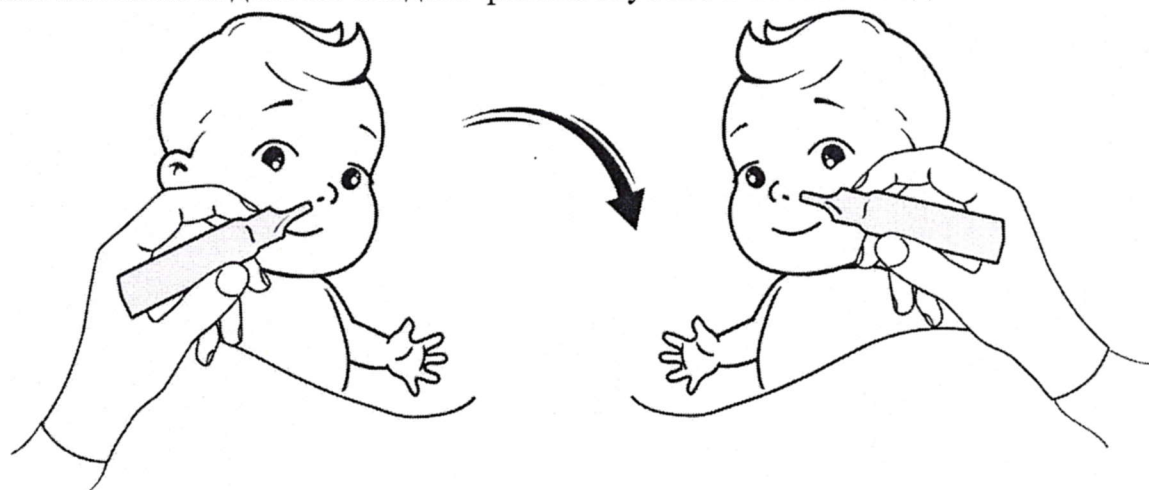

Детям и взрослым промывают в положении сидя или стоя, наклонив голову в сторону. Промыть верхний носовой ход, повторить функцию с другим носовым ходом. Благодаря химическому составу и концентрации длительность и кратность использования ПШИК МИНИ, раствора изотонического с морской водой, для детей не ограничены, изделие безопасно при длительном применении, не вызывает привыкания.

ПШИК МИНИ, раствор изотонический с морской водой, применяется для детей всех возрастов, взрослых, беременных и в период кормления грудью.

Меры предосторожности:

ПШИК МИНИ, изотонический раствор с морской водой, нельзя использовать лицам с повышенной чувствительностью к компонентам медицинского изделия.

ПШИК МИНИ, изотонический раствор с морской водой, можно применять в период беременности и кормления грудью.

ПШИК МИНИ, изотонический раствор с морской водой, не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.

Младенцам следует закапывать препарат с минимальным давлением для предотвращения риска попадания раствора в среднее ухо.

Сведения о стерильности:

Небула (монодоза) предназначена для однократного применения. Не использовать, если не была открыта или повреждена из-за риска быстрого бактериального загрязнения.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Предупреждения:

ПШИК МИНИ, изотонический раствор с морской водой, необходимо хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 2 года с даты изготовления.

Использовать до даты, указанной на упаковке.

Упаковка:

По 2 мл (ml) в небулах полиэтиленовых. По 10 небул в пачке из картона.

Производитель:

АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 63

www.farmak.ua

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству медицинских изделий на территории Республики Узбекистан


Представительство АО «Фармак» в Узбекистане

100170 Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Зиелилар 12а, 1/2

e-mail: info@farmak.ua

Тел: +998 (71) 235-77-13, +998 (71) 235-67-05

Символы, используемые на упаковке:

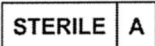	Производитель		Верхний предел температуры
	Повторно не использовать		Обратитесь к инструкции по применению
	Символ возможности повторного использования и переработки (PAP – из бумаги и картона; 21 – другие виды картона)		Стерилизован методом асептической обработки
	Не использовать в случае повреждения упаковки		Использовать до
	Номер серии (партии)		Дата изготовления

